

DNA サンプル採取の手順説明

家庭用キット

！必ずこの手順説明書に従って採取を行ってください！

同意書の読み合わせとサイン

サンプル採取を行う前に、必ず同意書を読み、同意のサインをしてください。同意書はサンプル・申込用紙と一緒に弊社までご返送して頂きます。同意されない場合は鑑定できません。

申し込み用紙への記入

- 1) 家庭用検査の氏名記入欄は偽名でも構いませんが、研究所では申込用紙に記入された氏名が登録されます。氏名は漢字で記入し、空いているスペースにローマ字での記入もしてください。
- 2) 住所記入欄は、検査結果の送付先住所を記入してください。
- 3) 電話番号は、弊社からお客様へ伝言がある場合に必要となります。必ず連絡の取れる電話番号の記入をしてください。（メールアドレスも可）
- 4) 人種の欄は、選択肢の中から適切なものを選び、○で囲んでください。もし適切なものがない場合、その他の欄へご自身の人種をご記入ください。

綿棒による口腔内粘膜サンプルの採取の手順

※サンプル採取を行う際は、必ず1人ずつ行ってください。採取したサンプルを入れる封筒に名前を記入し、封を閉じるまでの全ての手順を終えたあと、次の人のサンプル採取を行ってください。

- 1) 送付した袋の中を確認します。 **ピンク色の紙袋が母親用、青色が父親用、黄色が子供用、白色が追加人物用**（子供または父親が2名以上の場合、うち1人は白色を使用）です。色紙袋はそれぞれ2袋ずつ入っており、1人で2袋使用します。それぞれ色紙袋の中に、白い密閉袋が2個入っているのを確認します。その密閉袋を開けると2本の綿棒が入っています。

（※依頼された鑑定人数分のみ送付致しますので、必要数の増減があれば弊社へご連絡ください。）

2) 最初に1つの色紙袋に氏名などを記入します。記入漏れの無いようにしてください。

3) 2本の綿棒が入った白い密閉袋を開封し、綿棒の先端に触れないよう気を付けながら1本（または2本）の綿棒を取出し、検査を受ける人物（以下、被験者）の右側の頬の内側へ当てます。このとき、頬の内側以外が綿棒の先端に触れることの無いよう、十分に気を付けてください。（※できる限り被験者自身で行ってください。綿棒は1本ずつでも、2本同時に使用しても構いません。）

3) 綿棒を回転させながら上下させ、擦り付けます。綿棒全体に粘膜が付着するよう、少なくとも15秒以上はしっかりと押しつけ、擦り付けてください。

4) 右側を終えたら、左側の頬をもう1つの密閉袋に入っている綿棒で同じように行います。

5) 合計4本の綿棒を使い終えたら、最初に綿棒が入っていた色紙袋に綿棒をそのまま入れてください。このとき、色紙袋のなかに乾燥剤が入っているかどうかを確認します。乾燥剤は水分を吸収し、バクテリアの繁殖を防ぐために入っており、乾燥剤の有無は非常に重要です。乾燥剤と綿棒が入った状態で袋の封をしっかりと閉じます。

6) 残りの1袋を、2～5の順で同じように行ってください。

7) 2～6の工程を全員行います。必ず1人ずつ行い、綿棒を入れる袋を間違えることの無いよう十分に気を付けてください。

サンプル採取後の手順

1) すべての色紙袋の封がしっかりと閉じていることを確認し、それらを全部まとめて最初にキットが入っていた透明な袋（両サイドに穴が開いていて、英字の書かれている袋）に入れ、粘着テープを剥がして封をします。（注意：色紙袋をさらに別のビニール袋などに入れて密封しないでください。乾燥の妨げになり、バクテリア繁殖の原因となります。）

2) 申込用紙、同意書、サンプル（綿棒）の入った透明袋をまとめて、弊社まで返送してください。受け取ったサンプルは弊社からアメリカ研究所へ発送します。（※弊社への返送方法は問いません）

鑑定料金について

お客様が弊社へキット返送後、2週間以内に下記口座までお振込みをお願い致します。
お客様のお振込み頂く金額は合計で **¥** _____ です。

| |
|--|
| 沖縄銀行 北谷支店 (オキナワギンコウ チャタンシテン) 普通口座 : 1 4 3 8 6 6 6 口座名義 : パタニティ テスティング コーポレーション ワインスティープンス コット |
|--|

尚、料金振込の確認が取れない場合、お客様に検査結果をお伝えすることが出来ません
のでお気を付け下さい。

以上、ご不明な点・ご質問があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

パタニティテスティングコーポレーション
沖縄県浦添市仲間 2-22-1 1 階
Tel: 0120-705-825
Fax: 098-877-8235
Mail: info@ptclabs.jp
担当：當間・宮下